

可変式ビニールテント型飛沫防止カバー

Protect+A(プロテクトエー)

取扱説明書


【注意事項】

- ・本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。
- ・本製品は未滅菌です。
- ・本体に過度な荷重をかけないで下さい。

■同梱品

- ・テントフレーム本体
- ・Protect+A 用ディスポカバー 10枚 ※補充用に10枚入りを別途用意しております。
- ・固定用ベルト

■テントフレーム本体各部名称

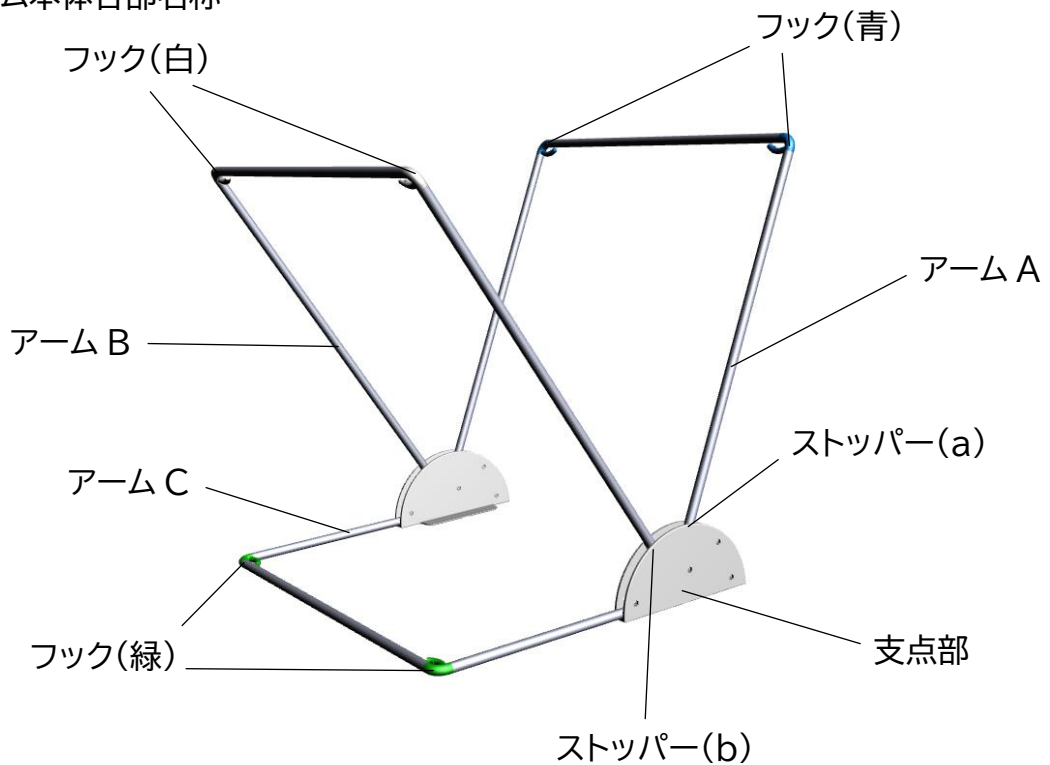



■組み立て手順

・本体の組み立て



①本体を平らな場所に置いて下さい。



②アームBを押さえながら、アーム A を支点部のストッパー(a)の位置まで引き上げて下さい。

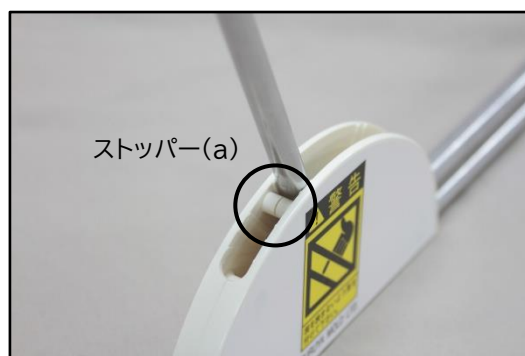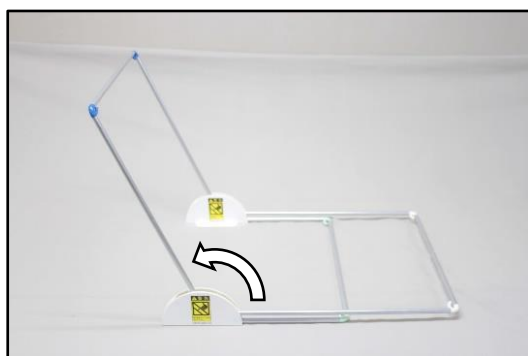

③同様にアーム B を支点部のストッパー(b)まで引き上げて下さい。

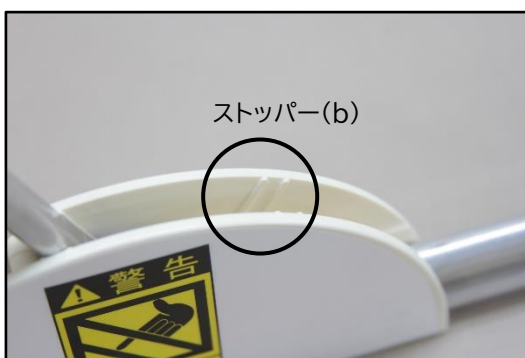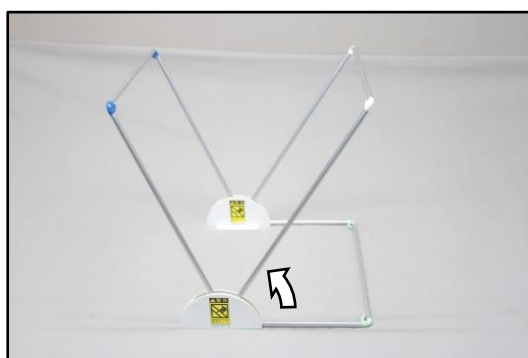

ストッパー位置以上にフレームを引き上げると破損する恐れがあります。
ストッパー位置以上にフレームを引き上げないで下さい。

・ディスプレイカバーの取り付け

ディスプレイカバーの各ホールの色はフレーム本体の各フックの色に対応しています。同じ色のホールとフックを組み合わせてください。




①フック(白)にディスプレイカバーの白色シールのホールを吊り下げて下さい。



②フック(青)にディスプレイカバーの青色シールのホールを吊り下げて下さい。



③フック(緑)にディスプレイカバーの緑色シールのホールを吊り下げて下さい。

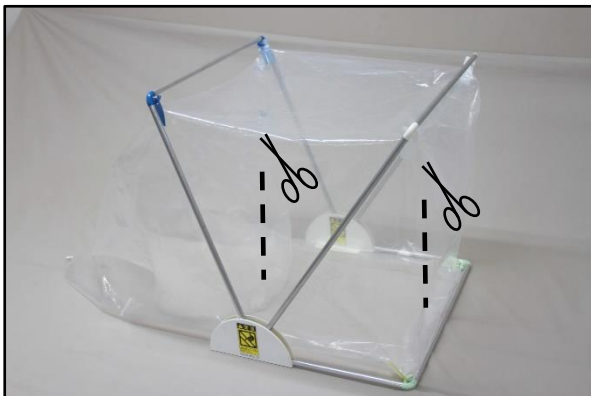

④必要に応じてハサミ等でディスプレイカバーに手を入れるスリットを入れて下さい。

■患者様へのセット

支点部が患者様の耳の位置に来るよう、組み立てたカバーを患者様へセットして下さい。



**本設置位置は目安です。
状況に応じ設置位置は調整下さい。**

**ディスプレイが患者の顔にかからない
ように十分に注意して下さい。**

■固定用ベルトのテント本体へのセット方法

本製品は固定用ベルトにより、設置時の本体のズレを軽減することが出来ます。必要に応じてストレッチャー等に取り付け、ベルトの長さを調整し固定して下さい。



①バックルをベルトから外し、アジャスターの裏側を表にしてベルトを置き、その上にフレームを置いてください。このとき片側のアジャスターからベルト端までの長さが30 cm程度になるように調整してください。

②左右ともアジャスター1個分程度の余裕があるようにアジャスターの位置を調整して下さい。

③下図のようにベルトを折返し、フレームの下を通します。





④

④左図のような状態になります。

⑤再びベルトを折り返しアジャスターにベルトを通します

⑥下図のようにベルトを完全にアジャスターへ通します。



⑤



⑥



⑦

⑦さらにベルトを引き左図のようになるように調整します。

⑧反対側も③からと同様にベルトを通してください。

この時フレーム間のベルトが極力だぶつかないように調整してください。


⑨バックルを取り付けて完成です。



⑧



⑨

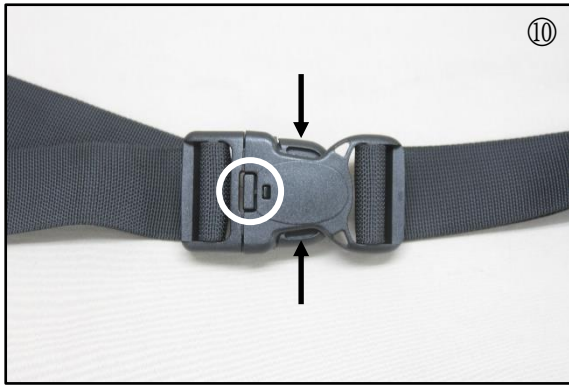

⑩本製品のバックルは左図○部分のボタンを押しながらサイド部分を押し出すことで外すことが可能です。

固定用ベルトは使用状況により緩むことがあります。ゆるみがないか都度確認をお願いいたします。

■使用後

- ・患者様からテントを外して下さい。
- ・ディスポカバーを各フックから外し廃棄下さい。

※ビニールカバーは単回使用です。再使用しないようお願いいたします。

- ・取り外しや廃棄の際は、ディスポカバー内側に触れないよう十分にご注意下さい。

■使用後のお手入れについて

- ・使用後はテントフレーム本体をアルコール等で拭き上げて下さい。
- ・有機溶剤は製品を劣化させるため使用しないで下さい。

■注意事項

- ・本製品は改善の為、予告なく仕様変更を行うことがあります。
- ・本製品を使用する前に十分な予行練習を行い、使用方法を熟知したうえでご使用下さい。
- ・ディスポシートのシール(粘着)部に影響がある為、高温多湿及び直射日光は避けて保管ください。

■材質

- ・テントフレーム本体 アーム部:アルミニウム フック部:ポリカーボネート 支点部:ポリカーボネート
- ・ディスポカバー カバー:ポリエチレン フック取付用ホール部:PET
- ・固定用ベルト バックル部:ABS ベルト部:ポリエステル

■保証期間

- ・納品より1年間

■お問い合わせ窓口

株式会社フルヤモールド 品質管理課

秋田県大仙市角間川町字中木内 244-1

TEL:0187-65-2477

e-mail:furuyamold@furuyamold.com