

可変式ビニールテント型飛沫防止カバー

Protect+A(プロテクトエー) type-W


取扱説明書

【注意事項】

- ・本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。
- ・本製品は未滅菌です。
- ・**本体に過度な荷重がかかるとフック部、ストッパー部分が破損する恐れがあります。組立時及び設置時には十分にお気を付けください。**

■同梱品

- ・テントフレーム本体 1台
- ・車いす取り付け用ホルダー 2個
- ・車いす取り付け用ポール 2本
- ・Protect+A type-W用ディスクカバー 10枚 ※補充用に10枚入りを別途用意しております。

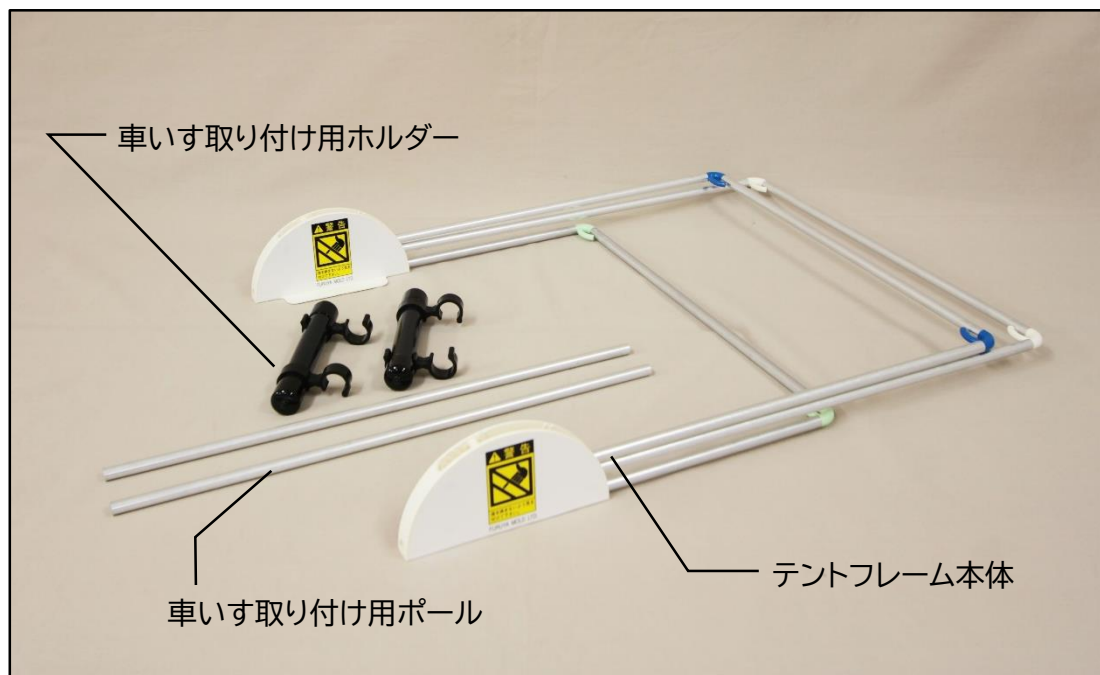

■組み立て手順

・車いす取り付け用ホルダーのとりつけ




①写真のように車いす取り付け用ホルダーを車いす本体に取り付けて下さい。





※ホルダー端面に切り欠きがある方が上側です。

- ・テントフレーム本体の組み立て
【テントフレーム本体各部名称】


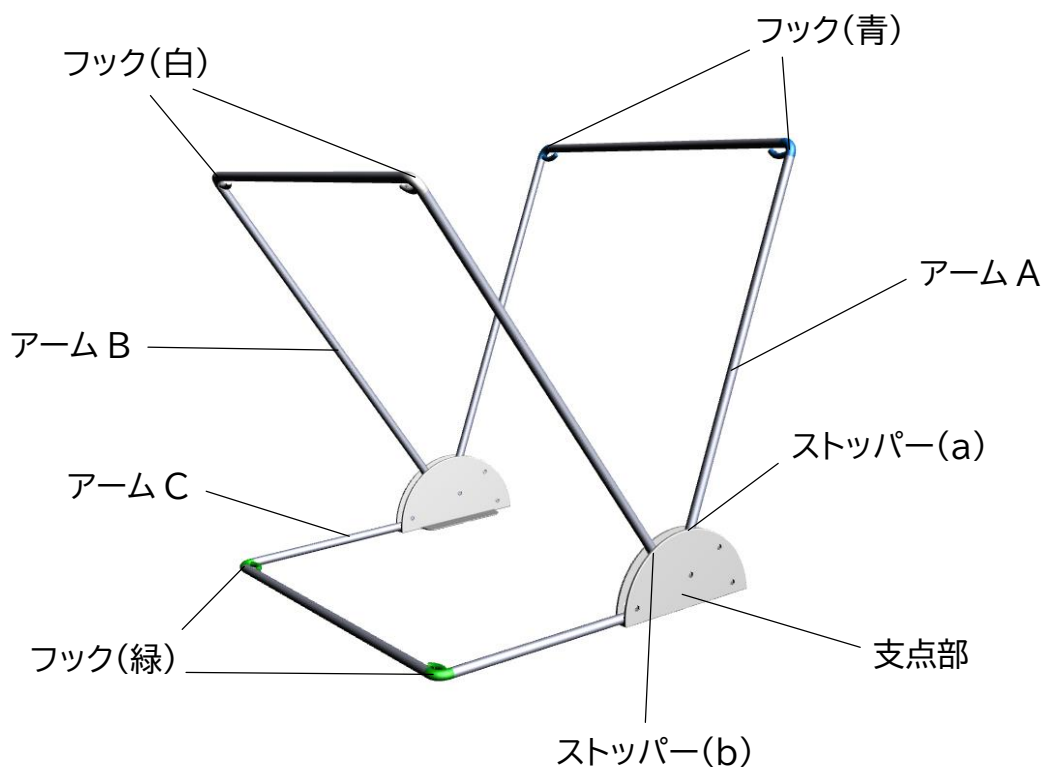


①本体を平らな場所に置いて下さい。

②アームBを押しえながら、アーム A を支点部のストッパー(a)の位置まで引き上げて下さい。

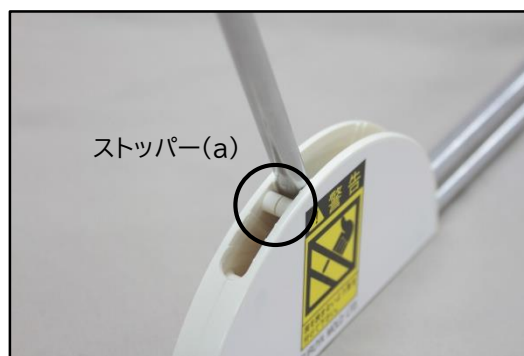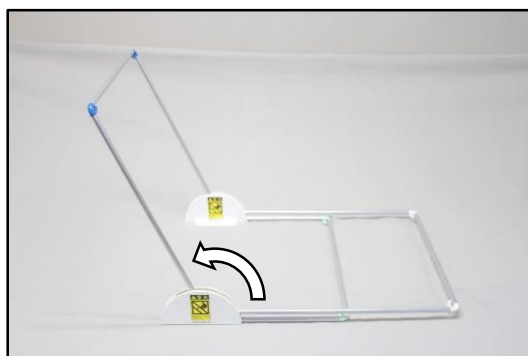


③同様にアーム B を支点部のストッパー(b)まで引き上げて下さい。

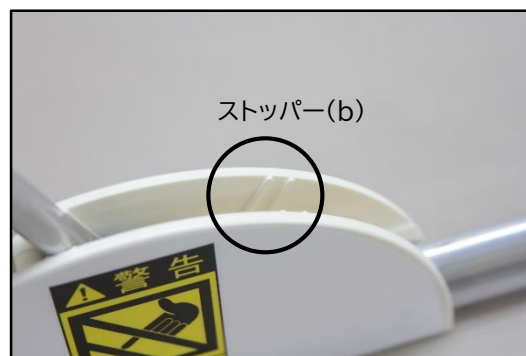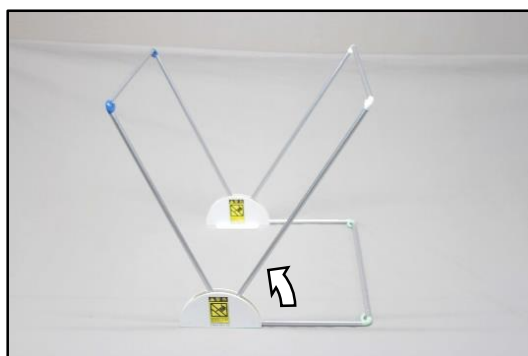


ストッパー位置以上にフレームを引き上げると破損する恐れがあります。
ストッパー位置以上にフレームを引き上げないで下さい。

・車いす取り付け用ポールの取り付け

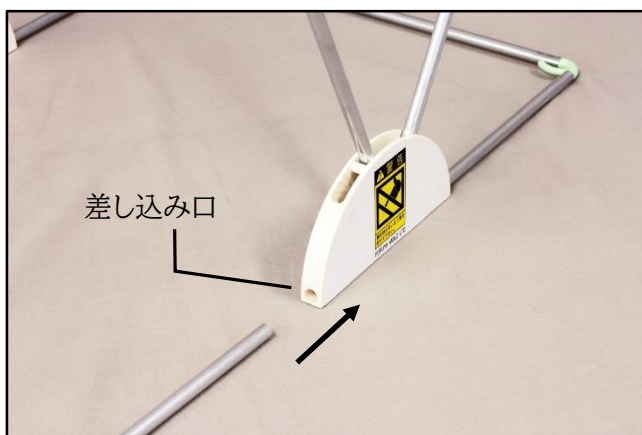

①車いす取り付け用ポールをテント本体の支店部差し込み口に奥までしっかりと差し込んで下さい。

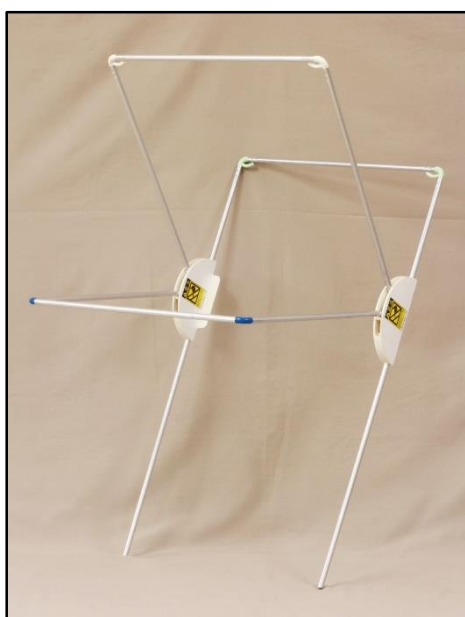

②左右 2 本とも同様に差し込みます

・ディスポカバーの取り付け

ディスポカバーの各ホールの色はフレーム本体の各フックの色に対応しています。同じ色のホールとフックを組み合わせてください。



①フック(白)にディスポカバーの白色シールのホールを吊り下げて下さい。



②フック(青)にディスポカバーの青色シールのホールを吊り下げて下さい。



③フック(緑)にディスポカバーの緑色シールのホールを吊り下げて下さい。



④これでテント本体の完成です。

・テント本体の車いすへの取り付け



①車いすに取り付けていたホルダーにテント本体の取り付け用ポールを差し込みます。



②これで完成です。

■ベッドでもご使用いただけます



本製品姉妹品 Protect+A type-H のディスポカバーをご使用いただくことで、本製品をベッドでご使用いただくことが可能です。

【別売】

Protect+A type-Hディスポカバー 10枚入
5,720円(税込)

■使用後

- ・ディスポカバーを各フックから外し廃棄下さい。

※ビニールカバーは単回使用です。再使用しないようお願いいたします。

- ・取り外しや廃棄の際は、ディスポカバー内側に触れないよう十分にご注意下さい。

■使用後のお手入れについて

- ・使用後はテントフレーム本体をアルコール等で拭き上げて下さい。
- ・有機溶剤は製品を劣化させるため使用しないで下さい。

■注意事項

- ・本製品は改善の為、予告なく仕様変更を行うことがあります。
- ・本製品を使用する前に十分な予行練習を行い、使用方法を熟知したうえでご使用下さい。
- ・ディスポシートのシール(粘着)部に影響がある為、高温多湿及び直射日光は避けて保管ください。

■材質

- ・テントフレーム本体 アーム部:アルミニウム フック部:ポリカーボネート 支点部:ポリカーボネート
- ・車いす取り付け用ホルダー パイプ管及びキャップ:PVC 取り付け部フック:POM
- ・車いす取り付けポール:アルミニウム
- ・ディスポカバー カバー:ポリエチレン フック取付用ホール部:PET

■保証期間

- ・納品より1年間

■お問い合わせ窓口

株式会社フルヤモールド 品質管理課

秋田県大仙市角間川町字中木内 244-1

TEL:0187-65-2477

e-mail:furuyamold@furuyamold.com